


Port de Visières


1° Nettoyer et désinfecter les différentes pièces (feuille, monture et élastique).

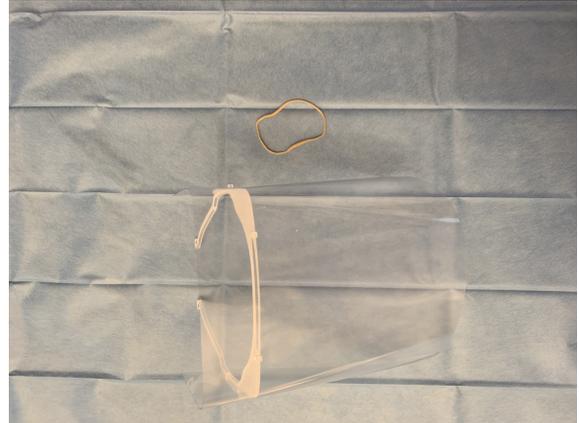


2° Assembler la feuille de pvc et la monture à l'aide des 6 trous déjà présents au niveau de la feuille.



3° Placer un élastique au niveau des extrémités des branches de la monture.

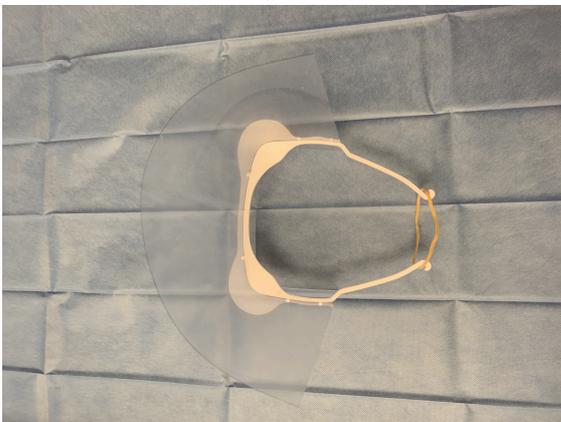

4° Placer sur le front en positionnant les doigts à la base des branches de la monture et vérifier la tenue.

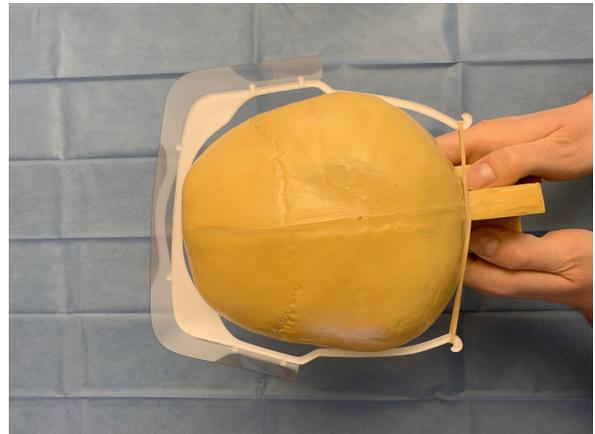


5° Les visières sont réutilisables. Nettoyer et désinfecter à nouveau.

Port de Visières


1° Nettoyer et désinfecter les différentes pièces (feuille, support et élastique).



2° Assembler la feuille de pvc et la monture à l'aide des 3 trous déjà présents au niveau de la feuille.

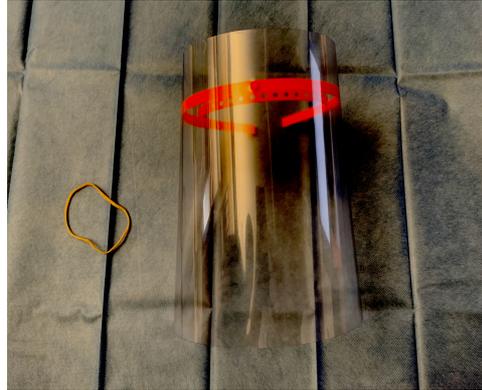

3° Placer un (ou deux) élastique(s) au niveau des extrémités des branches de la monture.

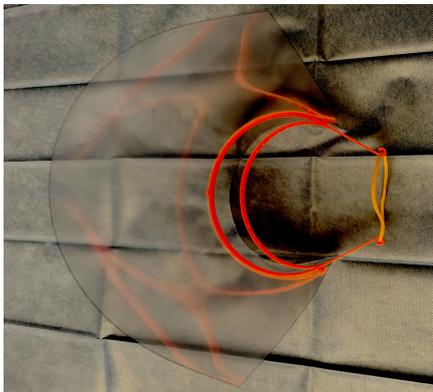

4° Placer sur le front et vérifier la tenue.



5° Les visières sont réutilisables. Nettoyer et désinfecter à nouveau.